

超強光 LED 照射器 マイティーライト

# MIGHTY LIGHT

¥29,800-



**3000**

最大3000mW/cm<sup>2</sup>  
のハイパワー


**110**

110g の軽さ

**7**

選べる7つのモード

# MIGHTY LIGHT

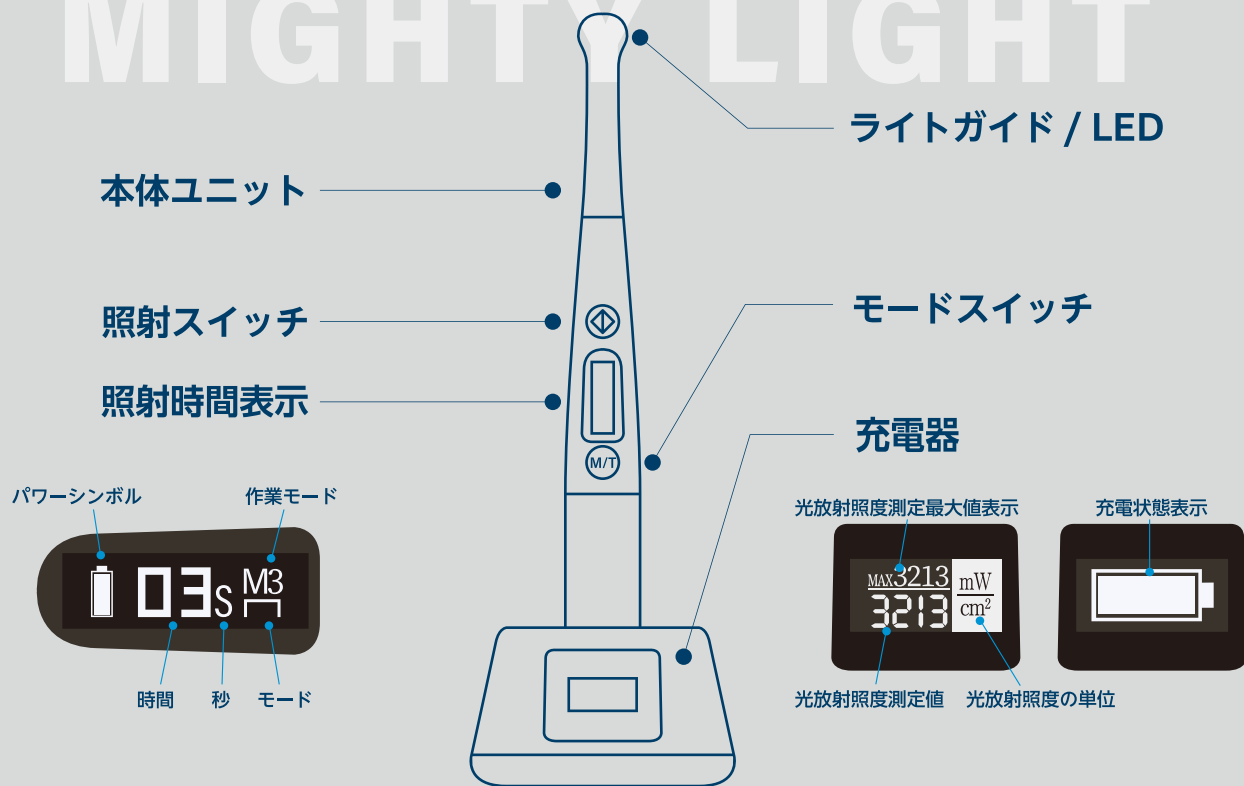

## 操作手順

① 電源を入れる



照射スイッチで ON/OFF

② モード・時間を選択



スイッチを押してモード選択を行い、スイッチ長押しで時間を選択

③ 照射スイッチ



スイッチを押して照射

## 7つのモード

M1

標準モード

照射時間 5-20 秒  
光強度 1000-1300mW/cm<sup>2</sup>



M2

強光モード

照射時間 3-5 秒  
光強度 1800-2100mW/cm<sup>2</sup>



M3

超強光モード


照射時間 1-3 秒  
光強度 2700-3100mW/cm<sup>2</sup>



M4

矯正モード

照射時間 3秒/5回, 3秒/10回  
光強度 2700-3100mW/cm<sup>2</sup>

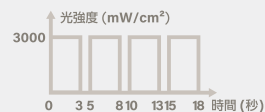

M5

検査モード

照射時間 30 秒, 60 秒  
光強度 —

M6

パルスモード

照射時間 5-20 秒  
光強度 1000-1300mW/cm<sup>2</sup>



M7

プログレッシブモード

照射時間 5-20 秒  
光強度 1000-1300mW/cm<sup>2</sup>



内容 ●本体 ●ライトガイド ●内蔵リチウムイオンバッテリー ●充電器本体 ●ACアダプター ●ライトバリア  
仕様 ●販売名:マイティーライト ●電源電圧: AC100V ●消費電力: 5W ●波長: 385nm~515nm ●使用光源: 青色LED ●寸法: 本体: W23mm×H23mm×L204mm(ライトガイド含む)  
充電器: W80mm×H70mm×L50mm ●重量: 150g(本体) ●一般医療機器 歯科重合用光照射器 ●特定保守管理医療機器 ●届出番号: 11B1X10025000003

●お問い合わせは下記まで

●製造販売元:アドバンスジャパン株式会社 〒334-0063埼玉県川口市東本郷118-1 TEL 048-234-8291 FAX 048-211-0861